

MANUAL DO USUÁRIO

ALTSEAL PLUS



ALT Equipamentos Médico Odontológicos Ltda.

Rua Major Rubens Vaz, 915 - Campos Elíseos - CEP. 14080-510 - Ribeirão Preto - SP

Fone: (16) 3628-0057

altequipamentos@altequipamentos.com.br

www.altequipamentos.com.br

INDICAÇÕES

- Para selagem de envelopes próprios para esterilização em autoclaves a vapor.

RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS

- Instalação e serviços de assistência técnica devem ser executados somente por pessoal autorizado.
- Este equipamento deve ser utilizado e manuseado por pessoa capacitada, observando as instruções contidas neste **Manual do Usuário**.
- É obrigação do usuário usar somente instrumentos de trabalho em perfeitas condições e proteger a si, pacientes e terceiros contra eventuais perigos.
- Não exponha o equipamento diretamente a luz solar, pois poderá causar o envelhecimento precoce de suas partes.
- Após inutilizar este equipamento, o mesmo deve ser descartado em local apropriado (conforme legislação local).


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Bivolt
- Interruptor liga/desliga;
- Controle de temperatura, possibilitando a selagem de materiais de diferentes espessuras;
- Indicador luminoso de resistência ligada;
- Suporte para rolo;
- Guilhotina.

DESCRIÇÕES TÉCNICAS

Voltagem	127 - 220 Vc.a
	50-60Hz
Fusível	8A
Peso Líquido (Kg)	1,615
Peso Bruto(Kg)	2,08
Gabinete	Aluminio/Aço Inox/Plástico ABS
Área de selagem	13mm
Potência	300 Watts

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

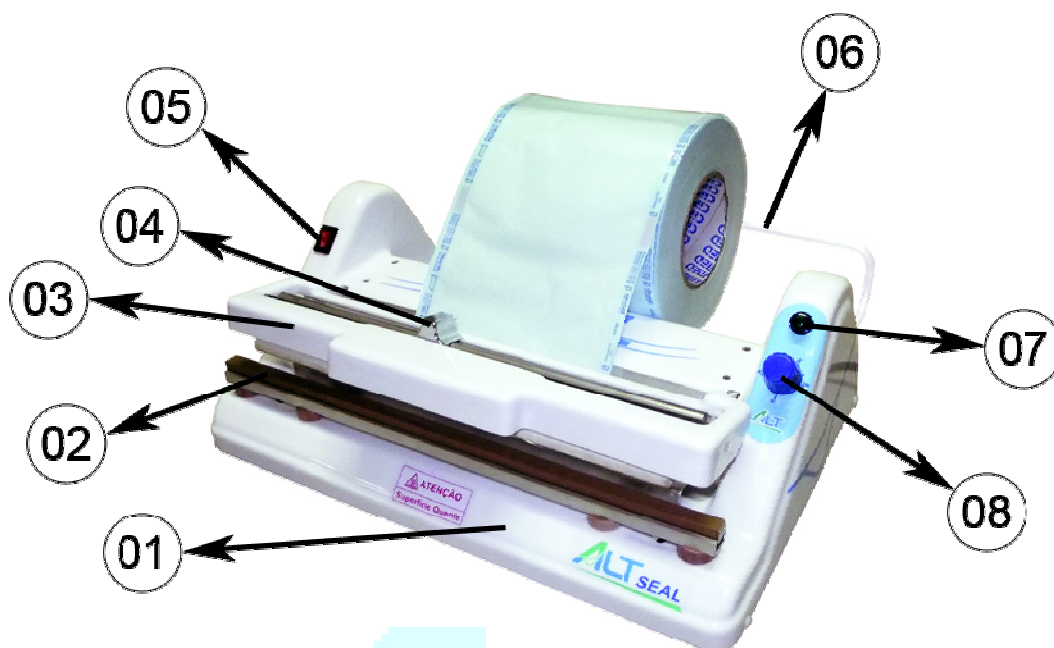

- 01 – Gabinete composto em alumínio / aço inox / plástico ABS
- 02 – Resistência/com área de selagem 13mm
- 03 – Braço
- 04 – Guilhotina
- 05 – Chave Liga/Desliga
- 06 – Suporte Para Rolo
- 07 – Indicador de Resistência Ligada
- 08 – Ajuste de Temperatura

INSTRUÇÕES DE USO

- 1 – Conecte o equipamento à rede elétrica;
- 2 – Ligue a chave Liga/Desliga;
- 3 – Ajuste no potenciômetro a temperatura desejada de acordo com a espessura do material a ser selado;
- 3 – Aguarde o aquecimento da resistência (em média 5 minutos);
- 4 – Feche o braço para realizar a selagem;
- 5 – Deslize a guilhotina até o outro lado para cortar;
- 6 – Ao fim do processo de selagem (10 segundos em média) retire o envelope.

6. NORMAS DE GARANTIA

6.1 Garantia

Os “Termos de Garantia” são os constantes do Certificado que acompanha o produto. Ficam vetadas quaisquer alterações ou concessões de garantia, condições e ou autorizações, tanto verbais como por escrito, sem anuência prévia e documentada pela fábrica. Você obterá atendimento de garantia, quando devidamente comprovado. O prazo de Garantia do produto está descrito no Certificado de Garantia do Produto.

Esta garantia não exime o cliente do pagamento da taxa de serviço pela visita e das despesas de locomoção do técnico, exceto quando o cliente enviar o equipamento para realizar a manutenção dentro do estabelecimento da assistência técnica. “Código de Defesa do Consumidor - art. 50, parágrafo único”.

PERDA DA GARANTIA

- A) Tentativa de reparo através de ferramenta inadequada ou por técnicos não autorizados;
- B) Instalação do equipamento por técnico não autorizado;
- C) Danos provenientes de armazenamento inadequado ou sinais de violação;
- D) Uso incorreto do equipamento;
- E) Uso de produto de limpeza não indicado pela fábrica;
- F) Quedas ou batidas que o equipamento possa vir sofrer ou falta de observação e atendimento às orientações do Manual do Proprietário, o qual foi entregue com o presente junto ao equipamento. Reparação ou substituição de peças durante o período da garantia não prorrogará o prazo de validade de garantia da mesma.

6.2 Certificado De Garantia

O Certificado de Garantia deverá ser preenchido pelo *Assistente Técnico Autorizado*, sendo que uma via já marcada será entregue ao proprietário para comprovação do equipamento em garantia, a outra deverá ser enviada para fábrica. Os custos de instalação de seu **ALTSEAL PLUS** não estão cobertos pela garantia, sendo a mesma responsabilidade exclusiva do usuário.

6.3 Manutenção

Todas as recomendações de utilização se encontram neste Manual, mas se algum problema ou mau funcionamento for detectado e não puder ser corrigido de acordo com as instruções aqui determinadas, entre em contato com a rede de serviços autorizada “**ALT**” para realizar a correção do problema.

6.4 Considerações Finais

Para garantir a vida útil de seu aparelho, reponha somente peças originais **“ALT”**.

Para efetuar qualquer manutenção do equipamento entre em contato com um de nossos Distribuidores Autorizados. Possuímos técnicos credenciados em todo o território nacional.

Para saber qual a Assistência Técnica mais próxima de você visite nosso site.

www.altequipamentos.com.br

6.5 Serviço De Atendimento



ALT Equipamentos Médico Odontológicos Ltda.

Rua Major Rubens Vaz, 915 - Campos Elíseos - CEP. 14080-510 - Ribeirão Preto - SP
Fone: (16) 3628-0057 suporte@altequipamentos.com.br www.altequipamentos.com.br

Equipamentos Médico Odontológicos

TERMO DE GARANTIA

A **ALT EQUIPAMENTOS** garante o seu ALTSEAL PLUS por 12 meses contra qualquer defeito de fabricação, devidamente constatados pelo fabricante, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra;

As despesas decorrentes do transporte ou encargos de estadas de técnicos designados para a execução de reparos são de responsabilidade do adquirente. - “Código de Defesa do Consumidor - art. 50, parágrafo único”.

Não se contempla neste “**Termo**” a reparação de danos causados por acidente, negligência, inexperiência operacional, exposição ao tempo, uso inadequado, instalação em rede elétrica de tensão imprópria ou sujeita a flutuações excessivas, ou ainda tenha inválida também a presente Garantia, a remoção ou alteração dos números de séries ou outros elementos identificadores do aparelho, impressos nas respectivas etiquetas e lacres.

Não se compreende na presente, a reposição de peças e materiais que apresentem, a qualquer época, defeitos pelo desgaste natural do uso.

As despesas com Assistência Técnica ficarão por conta do comprador/ proprietário quando constatado o uso inadequado ou quando o equipamento estiver fora da garantia.

Para validar sua garantia entre no site
www.altequipamentos.com.br e cadastre-se.