

MANUAL DO PRODUTO

HAI SAN

SUA MARCA COM ESTILO

**VAPOR DE OZÔNIO E
AROMATERAPIA**

1- CARACTERÍSTICAS

Design moderno, com braço e base de aço inoxidável, lâmpada ultravioleta com ação de ozônio, recipiente de água rosqueável, resistente e de fácil manuseio para limpeza, vedado com anel de borracha supereficiente, que evita vazamento de água ou vapor.

Tem controle microcomputadorizado, três níveis de pressão do vapor e monitora automaticamente o nível de água. Tem um sistema de alerta para nível muito baixo ou muito alto de água, evitando as complicações que podem danificar o motor (falta de água) ou provocar jatos quentes indevidos (excesso de água). Também elimina problemas de segurança decorrentes do vapor funcionar sem água.

2- FUNÇÕES


- Amolece as células mortas da superfície cutânea, preparando-a para os próximos tratamentos;
- Dilata os poros para uma limpeza mais profunda, ajudando na eliminação de toxinas;
- Atua no poro dilatado, amolecendo a oleosidade acumulada, comidões, restos de cosméticos e sujeira, o que faz os próximos tratamentos serem mais eficientes;
- Acelera a circulação sanguínea, hidrata as células e promove o aumento do metabolismo e regeneração celular da pele;
- Com espaço para aplicação de aromaterapia;
- Pode ser utilizado para herboterapia.

3- ESPECIFICAÇÕES E DADOS TÉCNICOS

Produto	Vapor de Ozônio e Aromaterapia
Função	Aromaterapia/Vapor facial
Voltagem	110-130V/700W 220-240V/850W
Frequência de trabalho	50/60HZ
Dimensões	101*39*27 cm
Peso	5,5 kg


4- DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA

Braço

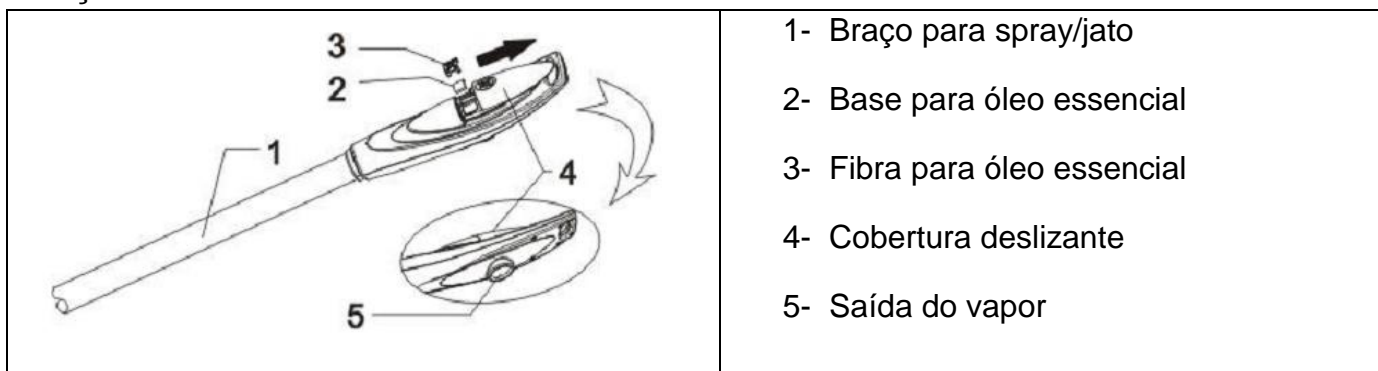


- 1- Braço para spray/jato
- 2- Base para óleo essencial
- 3- Fibra para óleo essencial
- 4- Cobertura deslizante
- 5- Saída do vapor

Aparelho

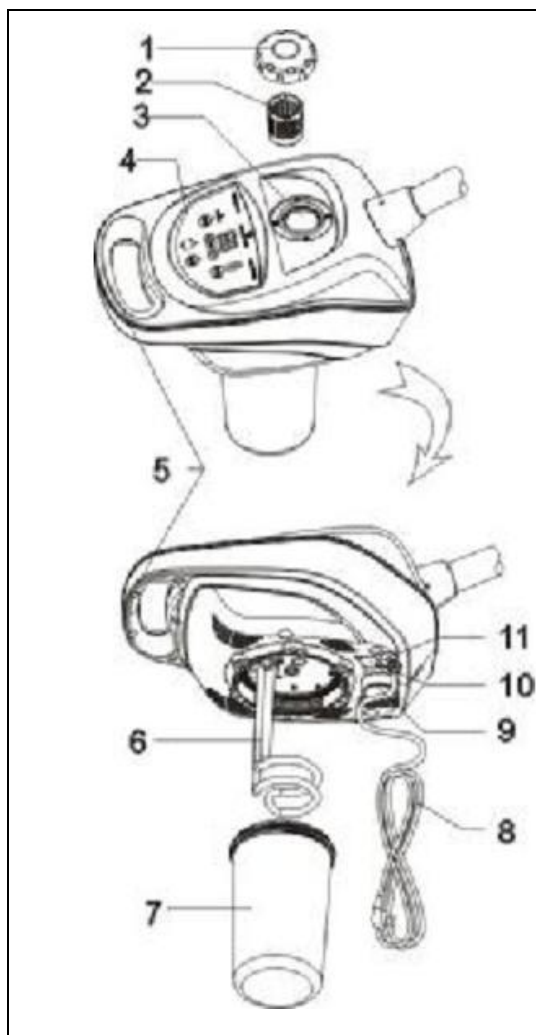


- 1- Tampa do recipiente para ervas
- 2- Recipiente para ervas
- 3- Compartimento de passagem de vapor
- 4- Painel de controle
- 5- Direcionador de vapor
- 6- Resistência
- 7- Recipiente para água
- 8- Cabo de eletricidade
- 9- Base para inserção da coluna
- 10-Botão liga/desliga

Coluna e base

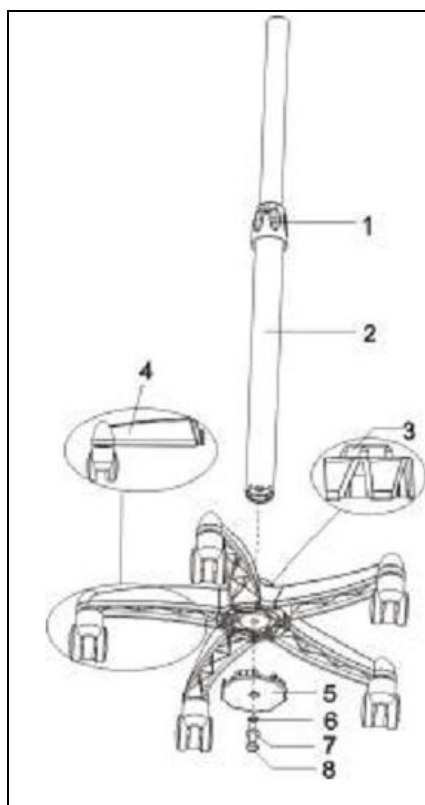


- 1- Ajustador da altura da coluna
- 2- Coluna
- 3- Base para colocação dos pés
- 4- Pés
- 5- Placa fixadora dos pés
- 6- Porca
- 7- Contraporca
- 8- Parafuso

6- INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

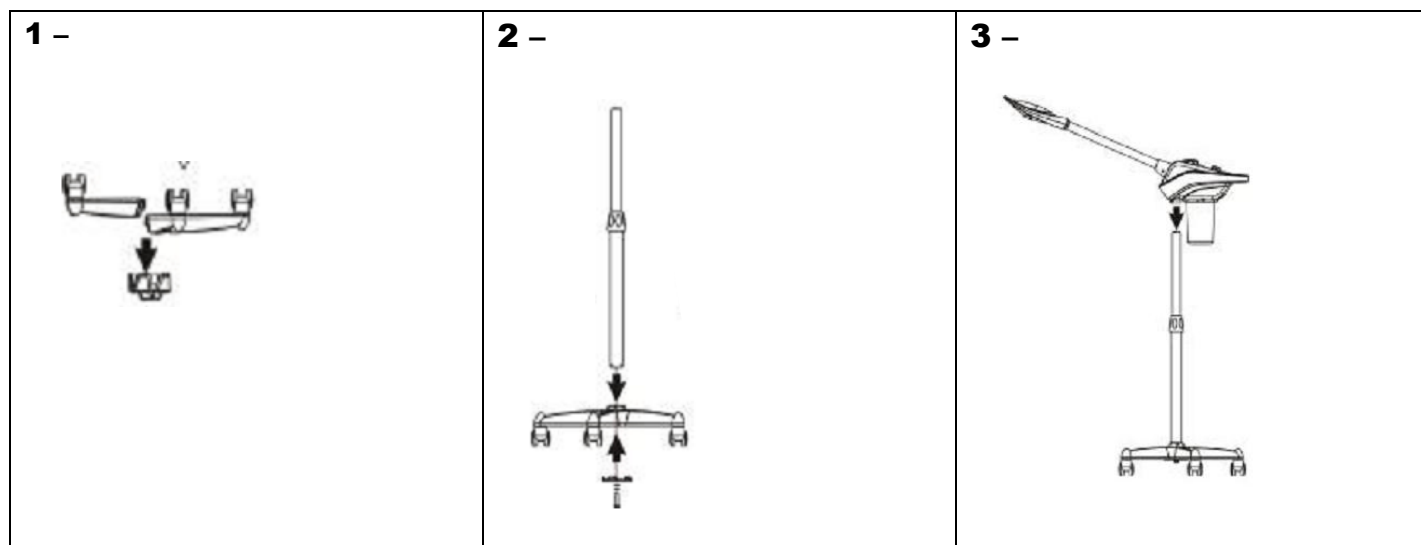

- 1- Pressione cada pé sobre a base.
- 2- Encaixe a coluna sobre a base. Prenda na base a placa fixadora dos pés, com a porca, contraporca e parafuso. Verifique se está firme.
- 3- Encaixe o aparelho na coluna.



7- DESCRIÇÃO DO PAINEL

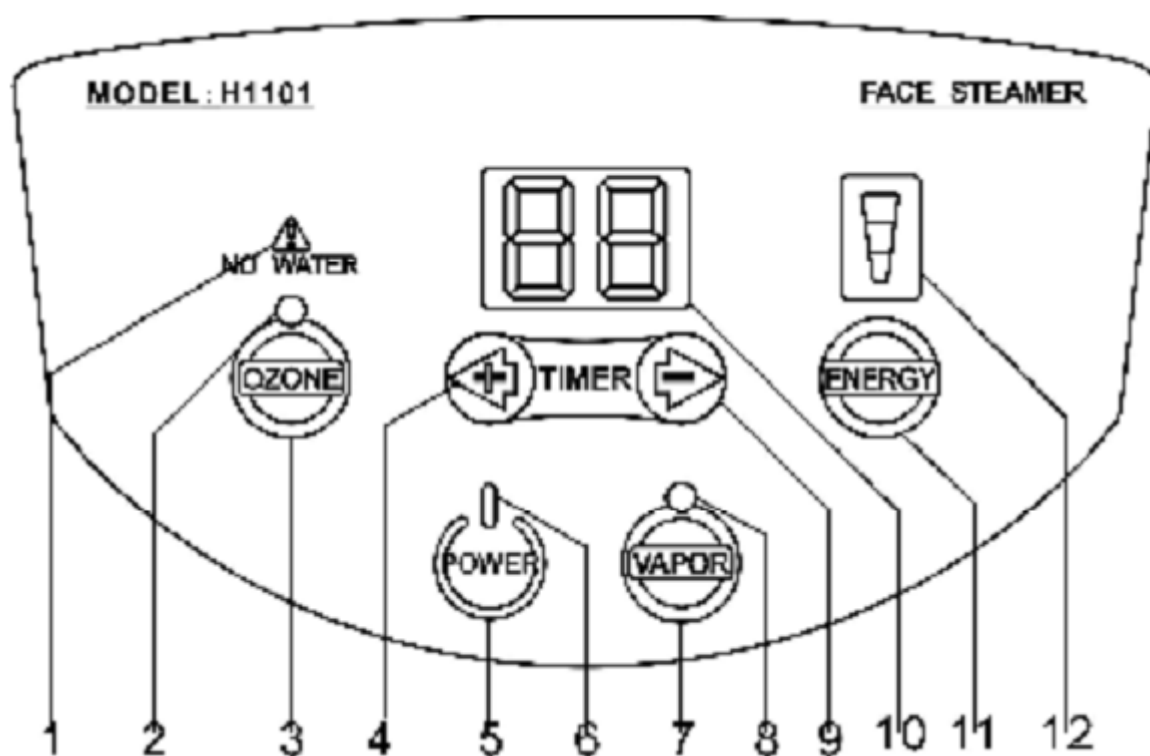


- 1- Indicador do nível de água alto/baixo
- 2- Indicador da função de ozônio
- 3- Botão de acionamento do ozônio
- 4- Ajuste de tempo + (mais)


- 5- Liga/desliga
- 6- Indicador de aparelho ligado
- 7- Acionamento do vapor
- 8- Indicador do acionamento do vapor
- 9- Ajuste de tempo – (menos)
- 10-Mostrador de tempo
- 11-Botão para selecionar nível de pressão do vapor
- 12-Display de nível de energia

8- INSTRUÇÕES DE USO

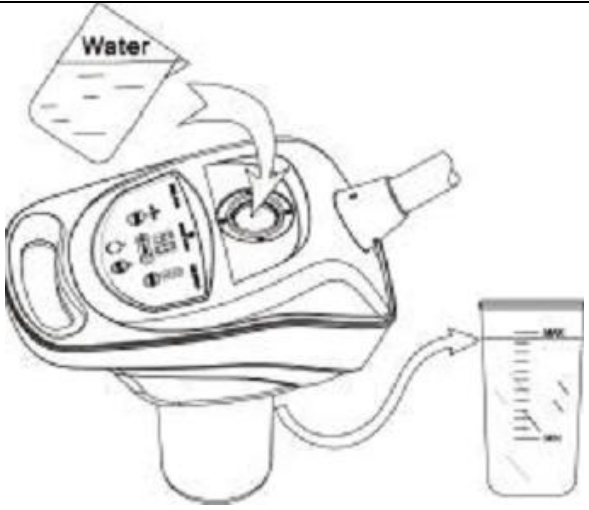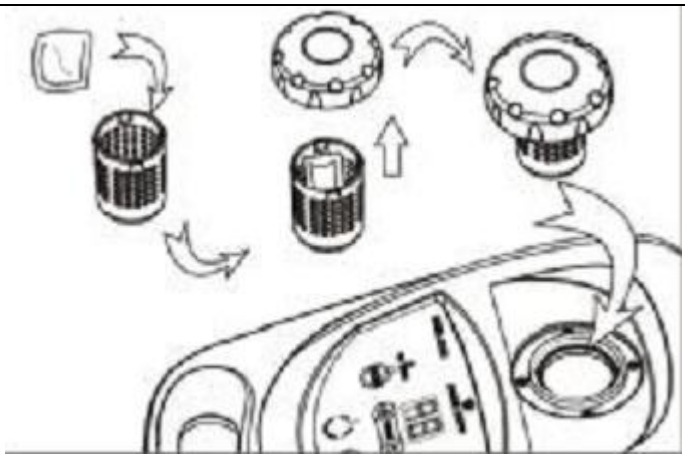 <p>O diagrama mostra um dispositivo de vaporizadores com uma seta apontando para a entrada de água. Um medidor de nível de água é exibido ao lado, com uma seta indicando o nível correto de água no recipiente.</p>	<p>1- Água no recipiente. Coloque água no recipiente, pela entrada indicada. O nível de água deve estar entre o mínimo e o máximo marcado na escala. Veja a figura;</p>
 <p>O diagrama mostra um dispositivo de vaporizadores com uma seta apontando para a entrada de ervas. Um medidor de nível de ervas é exibido ao lado, com uma seta indicando o nível correto de ervas no recipiente.</p>	<p>2- Conforme seu conhecimento em herboterapia, coloque a erva de sua escolha no recipiente para ervas indicado na figura, inserindo-o no local de entrada de água;</p>

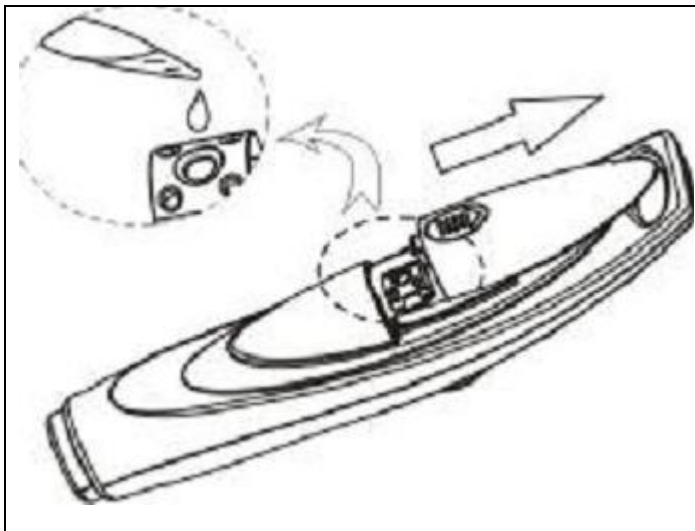

3- Adicionando óleo essencial. Se houver necessidade de usar óleo na terapia, abra o recipiente para óleo essencial na cobertura deslizante no topo do braço e coloque uma ou duas gotas de óleo essencial na fibra;

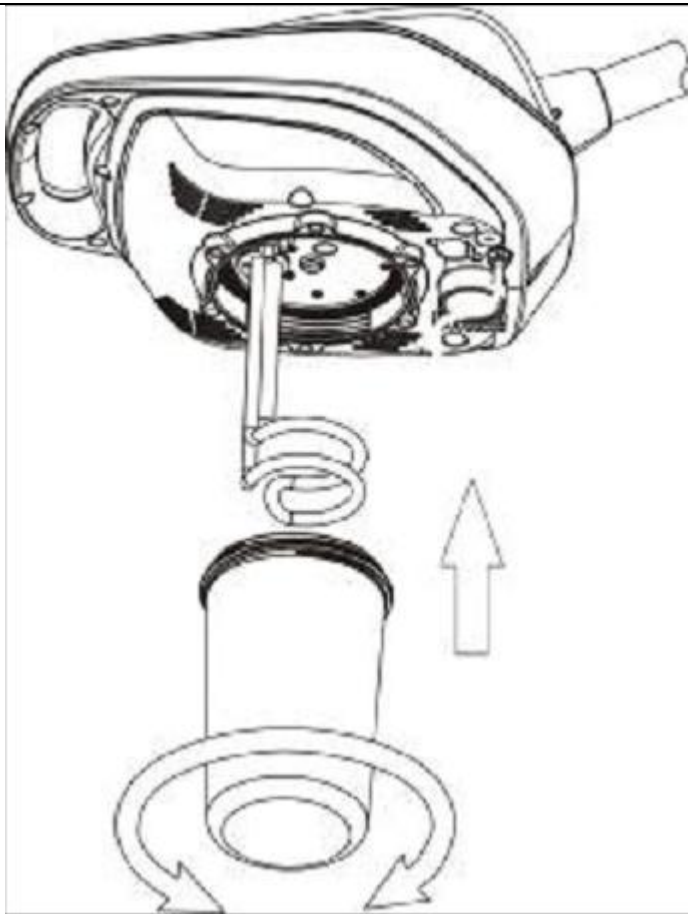

4- Instalação e remoção do recipiente de água:

- ✓ Desligue o aparelho antes de remover o recipiente de água;
- ✓ Segure o aparelho com uma mão e com a outra rotacione o recipiente até retirá-lo. Veja figura.

9- CONTROLE DO PAINEL DE OPERAÇÃO

- 1- Ligue o aparelho;
- 2- O indicador **POWER** fica ligado e o motor fica no status **STAND BY**;
- ✓ A janela de tempo mostra 15 min;
- ✓ A janela de **ENERGIA** mostra o máximo de potência;
- ✓ Os indicadores de **OZÔNIO** e **VAPOR** mostram que estão desligados;
- 3- Pressione o botão **VAPOR**. Ao ligar o botão, a **LUZ VERDE** indicará acionamento do vapor. Nesta hora, o aparelho começa a aquecer e produzirá vapor em aproximadamente 6 minutos;
- 4- Acerte o tempo. Após o início do vapor, acerte o tempo, pressionando (**BOTÃO +**) ou (**BOTÃO -**) até o tempo necessário. A escala de tempo é de 1 a 30 minutos.

- 5- Acerte a energia. Pressione **ENERGY** (botão selecionador do nível e pressão do vapor) para selecionar a potência do vapor, que pode ser alta, média ou baixa. Quando o display mostra luzes completas significa o máximo de energia e, com menos luz, o mínimo de energia. Antes da saída do vapor o botão deve estar selecionado no nível máximo, e depois ser ajustado de acordo com a necessidade;
- 6- Ligando a função Ozônio. Pressione o botão **OZONE**, verifique que o indicador de status ozônio ficará ligado e seus efeitos acontecem;
- 7- Alerta de nível de água. O sistema checará o nível de água automaticamente durante o aquecimento. Se o nível ficar normal (entre o mínimo e o máximo), o motor continuará funcionando. Quando o nível de água detectado for muito alto ou muito baixo (O display mostrará o alerta “E2” quando o nível de água estiver muito alto, e “E1” quando estiver muito baixo) o vapor parará de funcionar automaticamente. O indicador **VAPOR** ficará desligado e um alarme se ouvirá até que o nível de água volte ao normal, então você poderá religar o **VAPOR** e voltar a trabalhar.

ATENÇÃO:

- Antes de ligar o aparelho, por favor, confirme se o recipiente de água está firmemente fixado e o nível de água está entre a marca máxima e a mínima;
- Se necessitar acrescentar óleo essencial enquanto estiver trabalhando, só o faça depois de pausar o vapor;
- Se necessitar adicionar ervas medicinais durante o uso do aparelho, isso só pode ser feito um minuto depois de desligado o vapor. Nunca abra o compartimento antes desse tempo;
- Diariamente devem ser limpos o algodão para óleo essencial e o recipiente para ervas, quando usados.
- Antes de direcionar o jato para a face do cliente, espere que o vapor saia uniforme;
- O braço de vapor deve ser colocado aproximadamente a 40 cm do rosto do cliente e o vapor deve ser direcionado do queixo para a face, para evitar possível acidente com jato de vapor mais forte e quente;
- O ozônio tem características bactericidas importantes, mas também pode danificar a pele e eliminar os efeitos positivos das ervas. Então, é importante selecionar o tempo adequado de uso do ozônio (de 5 a 7 minutos) e não usar ozônio quando usar ervas concomitantemente;
- Não é permitido mexer no recipiente de água logo após o uso, senão pode haver queimaduras. Por favor, sempre espere o recipiente esfriar antes de manuseá-lo;
- É fundamental evitar colocar água em excesso no recipiente. Senão, além de causar problemas no motor do equipamento, pode ocorrer um curto circuito;
- 10 - Se acontecer problemas de vazamento de água ou de vapor embaixo do motor, ou no recipiente de ervas, lembre-se de cortar a energia antes de tomar qualquer providência. Depois, verifique se o recipiente de água ou o recipiente de ervas estão bem colocados. Se os problemas persistirem, contate a Haisan;
- Ligue este aparelho unicamente diretamente na linha elétrica, devidamente preservada com fio terra.

CUIDADOS

- É proibido colocar qualquer produto oleoso no recipiente de água ou no no recipiente de erva. Isso pode causar problemas no vapor de água;
- Cuidado com o direcionamento do jato do vapor na face do cliente, para evitar queimaduras;
- Não é permitido manusear o recipiente de água e o recipiente de ervas durante o funcionamento do vapor;
- Não é permitido colocar o aparelho em funcionamento em lugares superúmidos, como banheiros, por exemplo e em lugares diretamente sob a luz solar, pois causará condições instáveis de funcionamento;
- Se houver algum problema não indicado aqui, contate a Haisan para maiores orientações.

MANUTENÇÃO

- Limpe o conjunto de vapor pelo menos uma vez por semana. (Dica: coloque um pouco de ácido acético ou ácido cítrico na água do vapor para limpeza, vaporize por um minuto e depois refaça a operação com água limpa);
- Preste atenção frequentemente no nível do recipiente de água;
- Limpe o aparelho após cada uso, evitando acúmulo de produtos e sobras. Nunca utiliza álcool nas partes não metálicas, ele danifica o produto.

SAC: 41 3283-3667

E-MAIL: atendimento@haisan.com.br